



Beweglichkeit  
neu erfahren

**Fördertechnik Hölscher**

Schulstr. 8a  
41516 Grevenbroich

FON: 0 21 82 / 8 19 74

FAX: 0 21 82 / 8 19 73

E-Mail: [info@barrierefreies-badezimmer.de](mailto:info@barrierefreies-badezimmer.de)  
<http://www.barrierefreies-badezimmer.de>

Barrierefreie Badezimmer  
mit unseren Produkten:

Badewanne mit Tür  
&  
Wannenlift



Badewannenfertigung in Deutschland

**Liegewanne Relaxcare Tür rechts mit Lift (RCL RH)**



- Maße:** L x B x H = 1680mm x 760mm x 590mm
- Beschreibung:** Türverschluss außen in Wannenfärbung (Drehverschluss), Boden auf Wunsch antirutschbeschichtet. Exenterfernbedienung für den Ablauf.
- Verkleidung:** Frontverkleidung und 1 x Seitenverkleidung im Lieferumfang  
Bei Freiraummontage muss 2. Seitenverkleidung oder Zusatzpaneel extra bestellt werden.
- Sitzlift:** Sitzlift mit Hubhöhe ca. 320mm, Höhe über Wannensboden ca. 25mm, Bedienfeld im Wannenkörper integriert.
- Farbe:** Standardfarbe weiß, andere Farben nach RAL oder Sanitärplatten bestellbar.

**Nützliche Optionen:**

- Sicherheitsarmatur mit Verbrühsperre
- Haltegriffe für den sicheren Ein- und Ausstieg
- Vollelektronisches hydropneumatisches Air-System mit 8-12 Düsen je nach Anordnung
- Massagefunktion: stufenlose Motorregelung und automatische Selbstreinigung

**Liegewanne Relaxcare Tür rechts kurz (RCL RH K)**



- Maße:** L x B x H = 1500mm x 760mm x 590mm
- Beschreibung:** Türverschluss außen in Wannenfarbe (Drehverschluss), Boden antirutschbeschichtet. Exenterfernbedienung für den Ablauf.
- Verkleidung:** Frontverkleidung und 1 x Seitenverkleidung im Lieferumfang  
Bei Freiraummontage muss 2. Seitenverkleidung oder Zusatzpaneel extra bestellt werden.
- Sitzlift:** Sitzlift mit Hubhöhe ca. 320mm, Höhe über Wannenboden ca. 25mm, Bedienfeld im Wannenkörper integriert.
- Farbe:** Standardfarbe weiß, andere Farben nach RAL oder Sanitärplatten bestellbar.

**Nützliche Optionen:**

- Sicherheitsarmatur mit Verbrühsperre
- Haltegriffe für den sicheren Ein- und Ausstieg
- Vollelektronisches hydropneumatisches Air-System mit 8-12 Düsen je nach Anordnung
- Massagefunktion: stufenlose Motorregelung und automatische Selbstreinigung

*Relaxcare-Wannenlift LH*



## Relaxy-Wannenlift



### **Beschreibung:**

Der Badewannenlift wurde entwickelt, um älteren und etwas in der Bewegung eingeschränkten Personen wieder ein Stück Ihrer Mobilität zurückzugeben.

Das Band wird vor dem Baden an der vor der Wanne befestigten Konsole eingehangen. Durch Druck auf das Symbol „Heben“ auf der Bedienung wird jetzt das Band solange gespannt bis der Antrieb selbständig abschaltet. Der Badende kann sich jetzt rückwärts auf das gespannte Band setzen und die Füße nacheinander in die Wanne drehen. Danach wird auf der Bedienung die Richtung „Senken“ solange gedrückt bis die endgültige Sitzposition in der Wanne erreicht worden ist.

Nach dem Baden wird entsprechend in umgekehrter Reihenfolge verfahren.

Auf der Bedienung „Heben“ drücken bis der Antrieb abschaltet. Beine aus der Wanne drehen und aufstehen.

Das Band kann bei Alleinbenutzung in dieser Position belassen werden. Wenn in einem Haushalt eine Person nicht auf die Benutzung des Badelifts angewiesen ist, kann das Band nach dem Baden an der Konsole ausgehängt und bis auf ca. 5cm aufgerollt werden. Das Tragband besteht aus hochreißfestem beschichtetem und imprägniertem Polyamidgewebe. Durch die besondere Beschichtung kann das Band nicht verrotten, und Seifenreste lassen sich leicht entfernen.

Der Badende hat über die 3 Leuchtdioden an der Frontseite immer die volle Kontrolle über den aktuellen Ladezustand der eingebauten Batterie. Um den aktuellen Ladezustand anzuzeigen, wird kurzzeitig die Bedienung betätigt. Für die Dauer von 30 Sekunden wird jetzt der Ladezustand angezeigt.

#### Ladezustände:

„Grüne Diode“ leuchtet	Batterie voll
„Gelbe Diode“ leuchtet	Batterie noch 1/2voll
„Gelbe Diode leuchtet und „Rote Diode“ blinkt	Batterie muß demnächst nachgeladen werden
„Rote Diode“ leuchtet	Batterie laden keine volle Funktion mehr

Zum Laden der Batterie wird das mitgelieferte Spezialladegerät zuerst mit dem Gerät verbunden und danach in eine im Bad vorhandene Steckdose eingesteckt. Der Ladezustand der Batterie wird jetzt ständig über die 3 Leuchtdioden angezeigt.

Wenn nur noch die „Grüne Diode“ leuchtet, ist der Ladevorgang beendet, und das Ladegerät kann entfernt werden. Wenn der Ladevorgang über Nacht durchgeführt wird, ist der Akku am anderen Morgen ausreichend geladen.

#### **Technische Daten:**

- Alle funktionsrelevanten Teile aus nichtrostendem Stahl
- Leistungsstarker 24V Motor mit 150kg Hubkraft abhängig von den baulichen Zuständen (Wand- und Bodenbeschaffenheit)
- 24V Akkupack mit hoher Kapazität, dadurch werden lange Bereitschaftszyklen garantiert
- Das Tragband besteht aus hochreißfestem, beschichtetem Polyamidgewebe und ist in vielen verschiedenen Farben lieferbar
- Zusätzlich bieten wir als Option eine Gleiteinrichtung, die das Nachrücken beim Auf- und Abrollen erleichtert
- Integrierter Haltegriff aus Edelstahl oder in Wunschfarbe pulverbeschichtet
- Bedienung über Fernbedienung mit Spiralkabel
- Gehäuse auch in Wunschfarben und aus hochbelastbarem GFK gegen Aufpreis lieferbar
- 2 Jahre Garantie, ausgenommen Akkupack (1 Jahr)
- Nach EU Norm DIN EN 60035 CE- zertifiziert

***Band mit Gleiter bicolor***



## *Sitzwanne Relaxcare RH*



- Maße:** L x B x H = 1300mm x 670mm x 970mm
- Beschreibung:** Türverschluss außen in Wannenfarbe (Drehverschluss), Boden auf Wunsch antirutschbeschichtet. Exenterfernbedienung für den Ablauf. Sitzhöhe ca. 410mm.
- Verkleidung:** Bei Freiraummontage muss 2. Seitenverkleidung oder Zusatzpaneel extra bestellt werden.
- Farbe:** Standardfarbe weiß, andere Farben nach RAL oder Sanitärplatten bestellbar.

### **Nützliche Optionen:**

- Sicherheitsarmatur mit Verbrühsperre
- Haltegriffe für den sicheren Ein- und Ausstieg
- Vollelektronisches hydropneumatisches Air-System mit 8-12 Düsen je nach Anordnung
- Massagefunktion: stufenlose Motorregelung und automatische Selbstreinigung
- Beistellschrank in Wannenbreite weiß, Anfertigung nach Maß
- Türanschlag wahlweise links oder rechts

# Mobilität aus einer Hand

## ...und noch vieles mehr

- **Aufzüge für Aussen**
- **Aufzüge für Innen**
- **Plattformlifte**
- **Treppenlifte**
- **Elektromobile  
mit und ohne Dach**
- **Einstiegsduschen**

The logo for HÖLIFT features the word "HÖLIFT" in a bold, sans-serif font. The letters "H", "L", "I", and "F" are blue, while "Ö" and "T" are red. The text is framed by a red horizontal bar above and below it.

**Fördertechnik Hölscher**

Schulstr. 8a  
41516 Grevenbroich

FON: 0 21 82 / 8 19 74

FAX: 0 21 82 / 8 19 73

E-Mail: [info@barrierefreies-badezimmer.de](mailto:info@barrierefreies-badezimmer.de)  
<http://www.barrierefreies-badezimmer.de>